

アンティリーク 製品種類

	Basicーベーシックタイプー				Y-typeーYタイプー			
側管数	フィルター	ポート	チューブ径	型式	フィルター	ポート	チューブ径	型式
 4 本	有	無	標準径	AL-20F4	有	2	標準径	AL-20F4/Y1/P2
			細径	AL-S20F4				
		※ 2	標準径	AL-20F4/P2			標準径	AL-20F4/Y1/P2
			細径	AL-S20F4/P2			細径	AL-S20F4/Y1/P2
	無	無	標準径	AL-20N4	無	1	標準径	AL-20N4/Y1/P1
			細径	AL-S20N4				
		※ 2	標準径	AL-20N4/P2			標準径	AL-20N4/Y1/P1
			細径	AL-S20N4/P2			細径	AL-S20N4/Y1/P1
 2 本	有	無	標準径	AL-20F2	有	2	標準径	AL-20F2/Y1/P2
			細径	AL-S20F2				
		※ 2	標準径	AL-20F2/P2			標準径	AL-20F2/Y1/P2
			細径	AL-S20F2/P2			細径	AL-S20F2/Y1/P2
	無	無	標準径	AL-20N2	無	1	標準径	AL-20N2/Y1/P1
			細径	AL-S20N2				
		※ 2	標準径	AL-20N2/P2			標準径	AL-20N2/Y1/P1
			細径	AL-S20N2/P2			細径	AL-S20N2/Y1/P1
 1 本	有	無	標準径	AL-20F1				
			細径	AL-S20F1				
		※ 2	標準径	AL-20F1/P2				
			細径	AL-S20F1/P2				
	無	無	標準径	AL-20N1				
			細径	AL-S20N1				
		※ 2	標準径	AL-20N1/P2				
			細径	AL-S20N1/P2				

アンティリーク 製品仕様

チューブ材質	ポリ塩化ビニル (DEHP フリー)		
点滴筒	20 滴		
メインルート全長	【ベーシック】1720mm (※印は2270mm) 【Y-タイプ】フィルター付き：2350mm／フィルター無し：2270mm		
側管チューブ長	【ベーシック・Yタイプ】下流側から、525mm・500mm・475mm・450mm 【Yタイプ (Yルート)】1140mm		
包装単位	10 個 / 箱		


販売名：輸液セット 製品名：アンティリーク 一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認番号：30300BZX00250000 クラス分類：管理医療機器

販売元

**メディキット株式会社**
販売元：メディキット株式会社
〒113-0034 東京都文京区湯島1-13-2
TEL 03-3839-0201
営業所：東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢
名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎
<http://www.medikit.co.jp/>

製造販売元

**フォルテ グロウ メディカル 株式会社**
〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647番地
<http://www.fgm.co.jp>

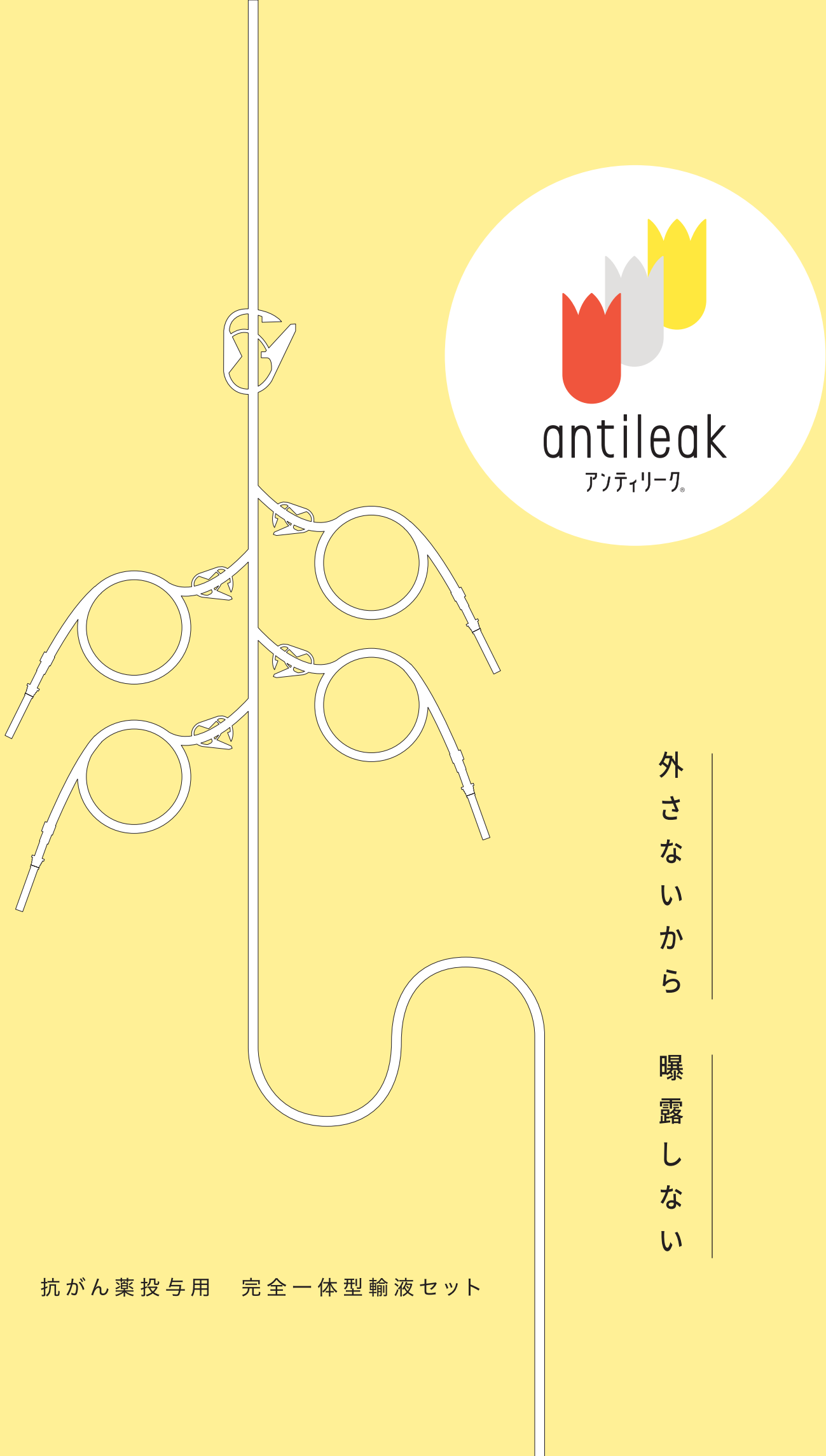

外
さ
な
い
か
ら

曝
露
し
な
い

抗がん薬投与用 完全一体型輸液セット



側管の使用順が直観的に分かるカラーリング

側管は童謡『チューリップ』の“♪赤・白・黄色～”という歌詞の通りに色分けをしています。
一剤目は赤色の側管というように、下から順にお使いください。
だれもが・いつでも・同じように作業できる工夫です。



オートプライミング機構

各キャップに疎水性フィルターが付いているため、メインルート
のびん針を輸液バッグに刺入するだけで全てのルートに補液が
充填され、プライミングが完了します。

患者さまの負担も軽減

側管を短くし、輸液セット上部に重量を集
約させることで、患者様の刺入部にかかる
負担を軽減しました。

外さないから、曝露しない

アンティリークは、曝露対策に特化した完全一体型の輸液セットです。

一滴も漏らさないための、「外さない抗がん薬投与」を提案します。

“外さない” という曝露対策

- ・抗がん薬投与後、接続部を外さないため、薬液の漏出がありません。
- ・完全一体型のため、接続部が外れるインシデントを防ぎます。

医療安全への 配慮

- ・側管クランプの色分けにより、投与手順の標準化が可能です。
- ・一体型は感染リスク対策にも効果的です。

業務の効率化

- ・オートプライミング機構により、容易に投与準備が完了します。
- ・完全一体型のため、器具の組み立てが不要です。

オーエーアイエス


OAIS (One Action Integrated System) とは

- ・ワンアクションでプライミング完了
- ・抗がん薬バッグは“刺したら抜かない”動作のワンアクション

CSTD (Closed System Drug Transfer Device) は 調製時 の曝露対策であり、
OAIS (One Action Integrated System) は 投与時 の曝露対策であると考えます。
“刺したら抜かない”曝露対策を実現する為の表現です。

ー 抗がん薬投与用 完全一体型輸液セット ー

アンティリーク Basic ー ベーシックタイプ ー

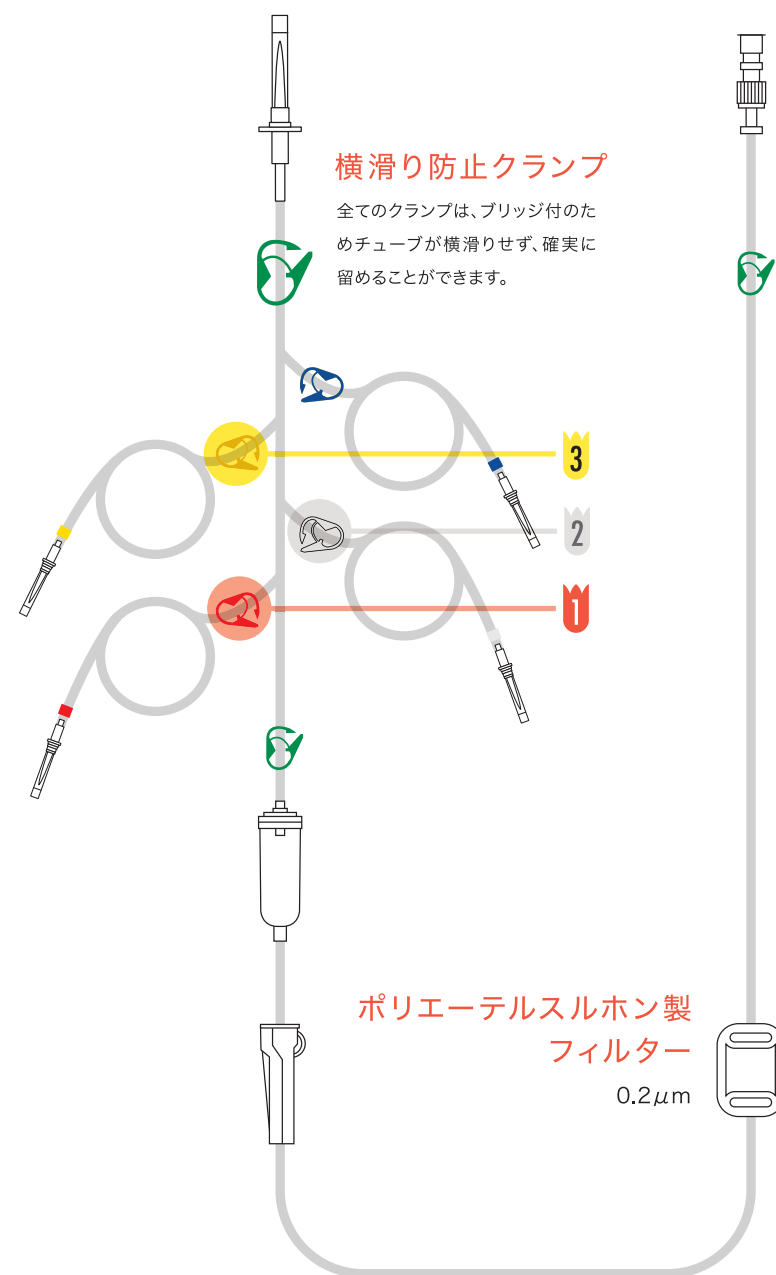

横滑り防止クランプ


全てのクランプは、ブリッジ付のためチューブが横滑りせず、確実に留めることができます。

ポリエーテルスルホン製
フィルター
0.2μm

「外す」投与管理から、「外さない」曝露／感染対策へ

ー 同時投与用 側管ルート付 ー

アンティリーク Y-type ー Yタイプ ー

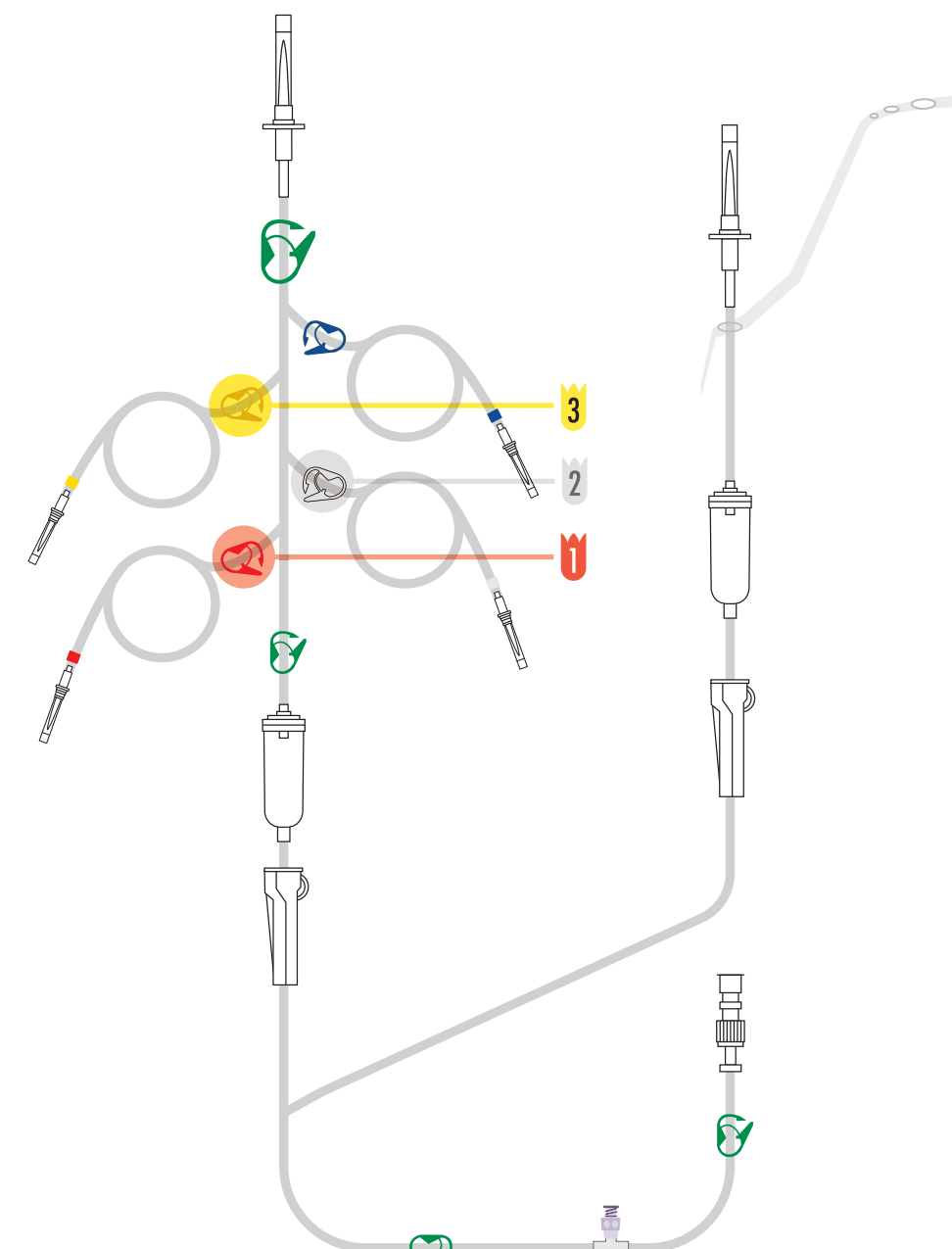

同時投与を伴うレジメンにも対応する新しい形