


針刺し防止機構付き止血弁内蔵透析用留置針
ハッピーキャス V

ハッピーキャス C-Pro

- フルカバータイプのセーフティ機能
- 多数回型止血弁の採用により、
圧迫止血や鉗子を用いたクランプ操作が不要

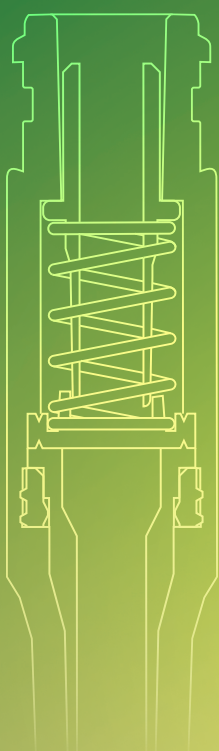

メディキット株式会社


血液曝露防止 ◀◀ 2つの安

内針フルカバー型安全機能 | 針刺し防止&血液曝露防止



● コンパクトな内針フルカバー機構

- スムーズな操作感と感染対策を両立しました
- 針刺しと血液曝露を防ぐフルカバータイプのパッシブセーフティ機能
- カテーテルの挿入抵抗を低減しました


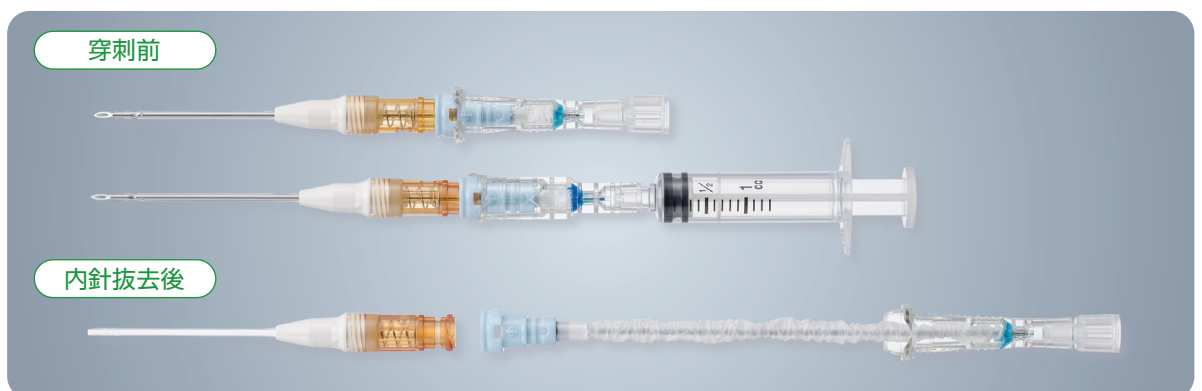


1. 穿刺する

2. 送り込む

3. 内針を引き抜く

4. 内針フルカバー

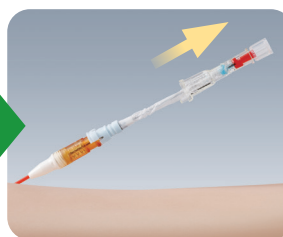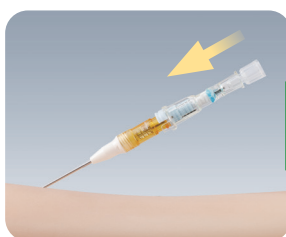


全機能 ▶▶ 針刺し防止

多数回型止血弁機能 | 血液曝露防止



● 止血弁をカテーテルハブに内蔵


- 多数回型止血弁の採用により
圧迫止血や鉗子を用いたクランプ操作が不要です。
- 透析中の一時離脱も可能です。

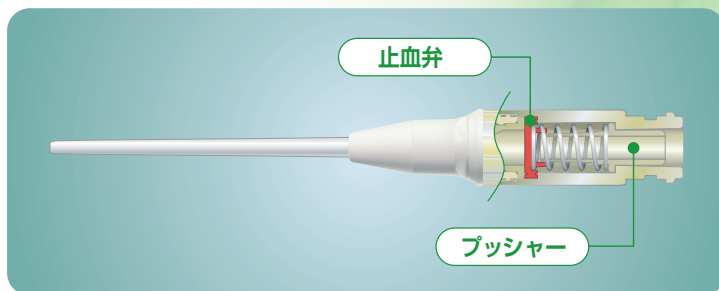

● 回路との接続

止血弁

内針抜去時

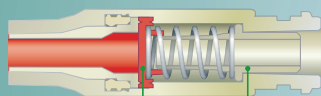


止血弁

プッシャー


内針を抜去すると止血弁が閉じて血液漏れを防ぎます。

回路との接続時

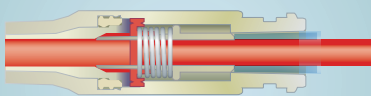

回路を接続するとプッシャーが止血弁を開放し流路が開通します。スクリューをしっかりとロックして下さい。


一時離脱時

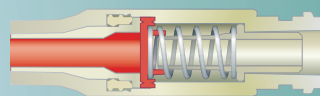

回路を外すと止血弁が再び閉じて自動的に止血します。(圧迫止血からの解放)

針刺し防止機構付き止血弁内蔵透析用留置針
ハッピーキャス V

ハッピーキャス C-Pro

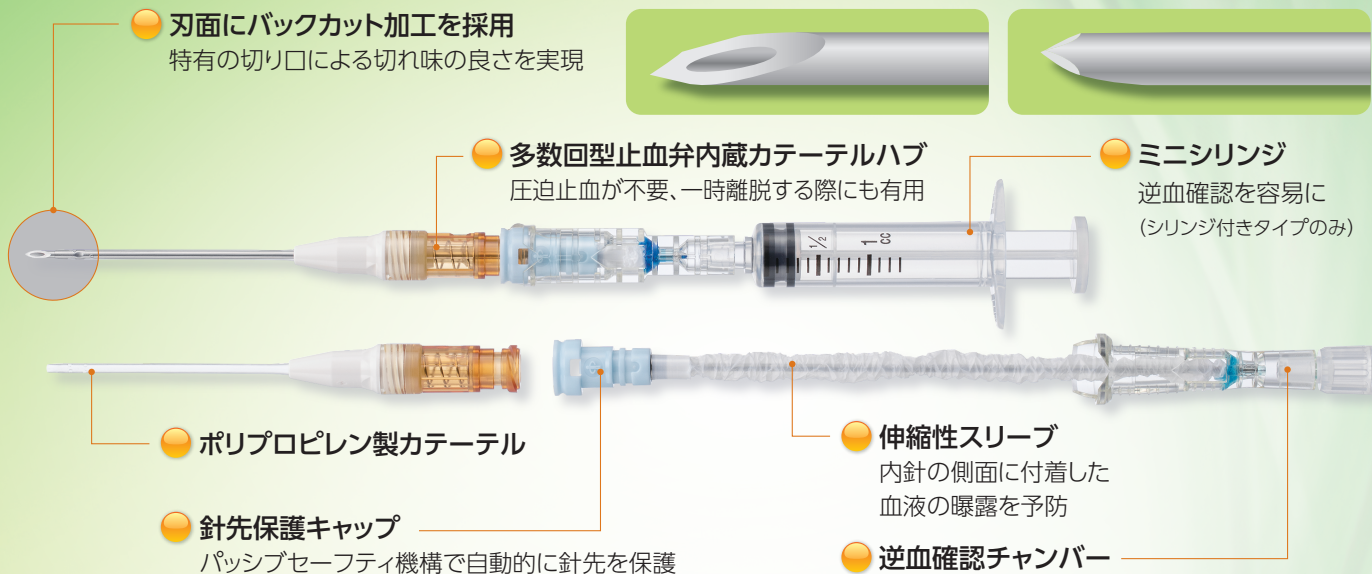

スタンダードタイプ

製品コード	品番	外径/内径	カラーコード	有効長	側孔	滅菌方法	JANコード	カテーテル材質
HP2590	EB 14G 4HVC×1.1/4"PP(C-Pro)	14/16G	ペールグリーン	33mm	○	電子線滅菌	4543527251921	ポリプロピレン
HP2592	EB 14G 4HVC×1"PP(C-Pro)			25mm	○		4543527251945	
HP2387	EB 15G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro)	15/17G	ブルーグレー	38mm	○		4543527237949	
HP2384	EB 15G 4HVC×1.1/4"PP(C-Pro)			33mm	○		4543527237130	
HP2390	EB 15G 4HVC×1"PP(C-Pro)			25mm	○		4543527237970	
HP2388	EB 16G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro)	16/18G	ホワイト	38mm	○		4543527237956	
HP2385	EB 16G 4HVC×1.1/4"PP(C-Pro)			33mm	○		4543527237147	
HP2391	EB 16G 4HVC×1"PP(C-Pro)			25mm	○		4543527237987	
HP2389	EB 17G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro)			38mm	○		4543527237963	
HP2386	EB 17G 4HVC×1.1/4"PP(C-Pro)	17/19G	レッドバイオレット	33mm	○		4543527237154	
HP2392	EB 17G 4HVC×1"PP(C-Pro)			25mm	○	4543527237994		

翼付きタイプ

製品コード	品番	外径/内径	カラーコード	有効長	側孔	滅菌方法	JANコード	カテーテル材質
HP2333	EB 15G 4HWVC×1.1/4"PP(C-Pro)	15/17G	ブルーグレー	33mm	○	電子線滅菌	4543527228824	ポリプロピレン
HP2334	EB 16G 4HWVC×1.1/4"PP(C-Pro)	16/18G	ホワイト	33mm	○		4543527228831	
HP2335	EB 17G 4HWVC×1.1/4"PP(C-Pro)	17/19G	レッドバイオレット	33mm	○		4543527228848	

ミニシリンジタイプ

製品コード	品番	外径/内径	カラーコード	有効長	側孔	滅菌方法	JANコード	カテーテル材質
HP2393	EB 15G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro S)	15/17G	ブルーグレー	38mm	○	電子線滅菌	4543527238007	ポリプロピレン
HP2394	EB 16G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro S)	16/18G	ホワイト	38mm	○		4543527238014	
HP2395	EB 17G 4HVC×1.1/2"PP(C-Pro S)	17/19G	レッドバイオレット	38mm	○		4543527238021	

シリンジ付きLSタイプ

製品コード	品番	外径/内径	カラーコード	有効長	側孔	滅菌方法	JANコード	カテーテル材質
HP2593	EB 15G 4HVC×1.1/2"PP(C-ProLS)	15/17G	ブルーグレー	38mm	○	電子線滅菌	4543527246774	ポリプロピレン
HP2594	EB 16G 4HVC×1.1/2"PP(C-ProLS)	16/18G	ホワイト	38mm	○		4543527246781	
HP2595	EB 17G 4HVC×1.1/2"PP(C-ProLS)	17/19G	レッドバイオレット	38mm	○		4543527246798	

販売名：ハッピーキャス V 医療機器認証番号：21400BZZ00343000 一般的名称：透析用留置針 クラス分類：II 入数：50本/箱

ご使用前に製品の電子添文を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



メディキット株式会社

発売元：メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-13-2 TEL.03-3839-0201
 製造販売元：東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6 TEL.0982-53-8000
 営業所／東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎
 流通倉庫／宮崎県日向市・千葉県佐倉市
<http://www.medikit.co.jp/>
<http://www.togomedikit.co.jp/>